

Pflegeanleitung für Korbtragen Carapace und Carapace Divi (SE-0010 / SE-0015)

Die Korbtragen SE-0010 Carapace und SE-0015 Carapace Divi sind robuste, widerstandsfähige Rettungsmittel zum Transport von Patienten.

Entsprechend wurden die Korbtragen auch zur einfachen Reinigung konzipiert. Grobe Verschmutzungen entfernen Sie bitte mit warmem Wasser und einem weichen Tuch oder Schwamm.

Bei hartnäckigem Schmutz können Sie auch ein sanftes Reinigungsmittel verwenden. Die Einlegematten sind wasserdicht und können auch mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.

Sollte es notwendig sein, Ihre Korbtrage zu desinfizieren, können sie jedes handelsübliche Flächendesinfektionsmittel verwenden.

Die Korbtrage Carapace SE-0010 benötigt keine weitere Pflege.

Weitere Hinweise für die Korbtrage Carapace Divi (SE-0015) und eventuell montierte Fahrgestelle:

Die Korbtrage Carapace Divi (SE-0015) ist für einen platzsparenden Transport 2-teilig und kann entsprechend ineinander gestapelt gelagert werden. *Bitte stapeln sie immer das Fußteil in das Kopfteil.*

Wird die 2-teilige Korbtrage ineinander gestapelt gelagert, ist die Einlegematte aus dem Kopfteil zu entfernen und im Fußteil zu lagern. Dieses Vorgehen schont das Material der Einlegematte.

Auch ist der Transport in der optional erhältlichen Tragetasche Carabag II (SE-0022) nur in dieser Konfiguration vorgesehen.



Die Gleitflächen der Verbindungsteile sind mit handelsüblichem Trockenschmiermittel gängig zu halten. Versuchen Sie niemals, die Korbtrage mit großer Kraft zusammen zu bauen!

Ist Ihre Korbtrage mit einem Fahrgestell ausgestattet, sind die Gleitflächen der Steckachsen und die Achsaufnahme des Fahrgestells ebenfalls mit Trockenschmiermittel gängig zu halten. Die Achsen sollten leichtgängig in die Achsaufnahme gleiten. Wenden Sie niemals große Kraft an, um

die Achsen zu montieren. Das kann Achsen und Fahrgestell beschädigen. Sollten Sie Ersatzteile wie z.B. Sicherungssplinte benötigen, verwenden Sie bitte ausschließlich Originalteile von SmartEm!