


Bedienungsanleitung Dönges Gurtsystem Spiderstrap

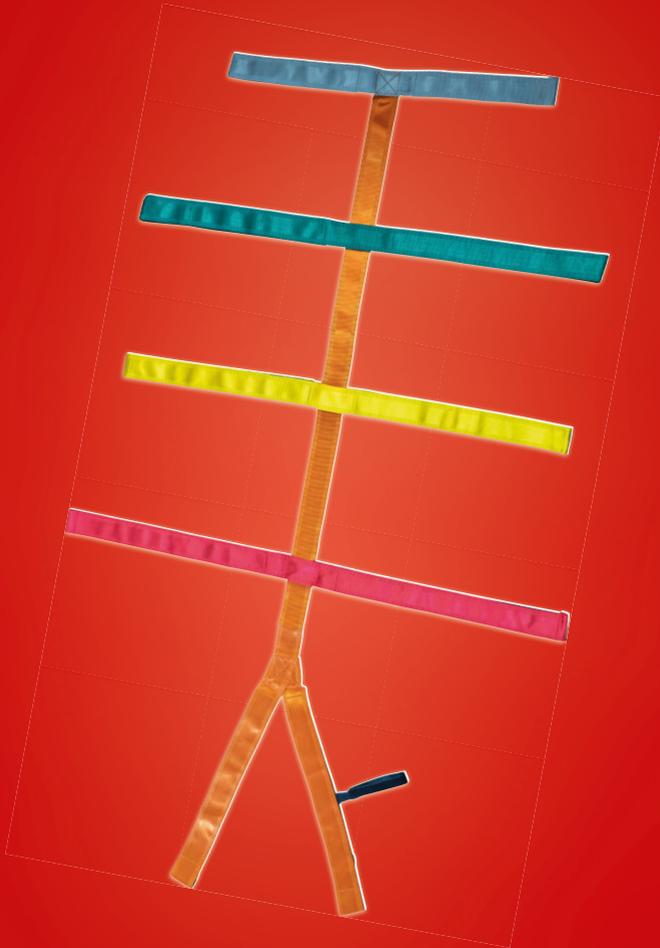

Best.-Nr. 201396

www.doenges-online.de

 **dönges**
FIRE & RESCUE

Achtung

Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Lieferumfangs. Sie enthält wichtige Hinweise zur Wartung und zum Gebrauch dieses Produktes. Bewahren Sie diese deshalb gut auf und geben Sie diese bei einem Besitzerwechsel unbedingt an den neuen Eigentümer weiter.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein medizinisches Produkt, das nur von eingewiesenem und regelmäßig auf das Produkt geschultem medizinischen Fachpersonal angewendet werden darf!

Wichtige Hinweise

Vor der Benutzung des Dönges Gurtsystem Spiderstrap muss diese Bedienungsanleitung unbedingt vollständig gelesen werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Schäden, die aufgrund unsachgemäßer Benutzung oder Missachtung dieser Hinweise entstehen, keine Haftung übernehmen. Eine Verwendung im Einsatz darf erst erfolgen, wenn sich die Benutzer mit der richtigen und sicheren Handhabung vertraut gemacht haben. Wir empfehlen, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieses Rettungsgeräts regelmäßig zu üben, um im Einsatzfall ein absolut sicheres Handling zu gewährleisten. Die gezeigten Anwendungsmöglichkeiten stellen keinerlei medizinische Empfehlungen dar!

Lieferumfang

Überprüfen Sie sofort nach Erhalt den Lieferumfang. Fehlende Teile müssen innerhalb einer Woche nach Erhalt reklamiert werden. Nachträgliche Reklamationen werden nicht anerkannt. Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten:

- 1 Gurtsystem Spiderstrap
- 1 Bedienungsanleitung

Gewährleistung

Wir garantieren die Mängelfreiheit des von uns gelieferten Produktes innerhalb der gesetzlichen Fristen. Eine Erfüllung dieser Gewährleistung erfolgt nach unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatz des defekten Gurtsystems Spiderstrap. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe an den Kunden. Als Nachweis dient der Lieferschein oder die Rechnung des Lieferanten. Die Garantie beschränkt sich ausdrücklich auf Ersatz oder Reparatur des defekten Produkts. Etwaige Folgeschäden sind ausdrücklich ausgeschlossen. Jegliche Änderungen oder Reparaturen einer nicht von uns bevollmächtigten Stelle führen zum sofortigen Wegfall sämtlicher Garantie oder Gewährleistungsansprüche.

Kundendienst

Reparatur- und Servicearbeiten dürfen nur durch von uns zertifizierte Servicestellen erfolgen. Sollten Sie Ersatz- oder Zubehörteile benötigen, verwenden Sie nur von uns freigegebene Teile. Bei Bestellung geben Sie unbedingt die Seriennummer des Gurtsystems Spiderstrap an. Zubehör und Ersatzteile erhalten Sie von:

Dönges GmbH & Co. KG

Dönges-Straße 1
D-42929 Wermelskirchen
Telefon: 02191 / 5626-0
Fax: 02191 / 5626-199
Internet: www.doenges-online.de
e-mail: info@doenges-online.de

Achtung

Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen oder Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör können zu einer tödlichen Gefahr für Anwender oder der zu rettenden Person führen!

Technische Daten

Material: Polypropylene
Gewicht: 400 g


Allgemeine Hinweise

Das Gurtsystem Spiderstrap wird benutzt, um den Patienten im Falle eines Notfalls am Spineboard für den Transport zu fixieren. Dieses Gurtsystem ist nur für die Nutzung mit einem Spineboard vorgesehen!

Anwendung

Beachten Sie die Verletzung/-en des Patienten und fixieren Sie die verletzten Körperteile mit Vorsicht und Genauigkeit.

Nachdem der Patient auf ein Spineboard gelegt wurde, wird das Gurtsystem angelegt, um den Patienten für den Transport zu fixieren. Beginnen Sie die Fixierung des Patienten immer am Kopf! Die unterschiedlichen Farben der Gurte helfen bei der Orientierung und Handhabung:

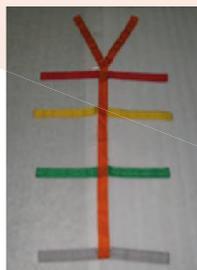

Rote Gurte = Fixierung der Schultern und des Brustkorbs

Gelbe Gurte = Fixierungen der Taille

Grüne Gurte = Fixierung der Oberschenkel

Graue Gurte = Fixierung der Unterschenkel

Der Patient muss vor dem Transport gut gesichert sein. Achten Sie darauf, dass die Gurte nicht zu fest oder zu lose sitzen. Passen Sie die Gurte so lange an, bis die Sicherheit des Patienten gewährleistet ist.

Pflege

Reinigen Sie das Gurtsystem nach jedem Gebrauch mit Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Verstauen Sie das Gurtsystem erst nachdem es vollständig trocken ist. Bitte die Gurte im Falle von Verschmutzungen durch Blut oder andere Körperflüssigkeiten nach der Reinigung desinfizieren.



Rev. 2.0 10/2020

Dönges GmbH & Co. KG
Dönges-Straße 1
D-42929 Wermelskirchen
Telefon: 02191 / 5626-0
Fax: 02191 / 5626-199
www.doenges-online.de
info@doenges-online.de