


Bedienungsanleitung

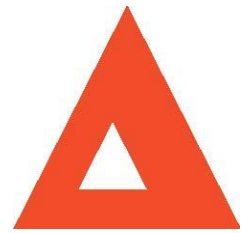

Artikelbezeichnung: **PAX® Tragetuch**
PAX® Tragetuch mit Fußsack
PAX® Tragetuch mit Durchrutschsicherung

Oberflächenmaterial: (Je nach Ausführung)	Nylon PAX®-Plan PAX®-PES (Netzstoff)
Abmessungen: Max. Traglast: Gewicht:	mind. 185 x 57 cm 150 kg ~ 1,2 -1,8 kg
Temperaturbereich:	Lagerung zwischen 10 ⁰ -30 ⁰ Celsius Anwendung zwischen -10 ⁰ +50 ⁰ Celsius
Prüfnorm:	DIN EN 1865
Klassifizierung:	Medizinprodukt Klasse I
Hersteller/Vertrieb:	X-CEN-TEK GmbH & Co. KG Westerburger Weg 30 26203 Wardenburg Deutschland Telefon: +49 (0)4407 – 7 14 76 0 Telefax: +49 (0)4407 – 7 14 76 99 E-Mail: info@pax-bags.de Internet: www.pax-bags.de

Zweckbestimmung

Tragetücher werden verwendet, um Patienten aus Bereichen sachgerecht zu transportieren, in den das Platzangebot oder die Umgebungsbedingungen nicht ausreichend sind für eine direkte Lagerung des Patienten auf die Patiententrage. Die Anwendung eines Tragetuches erfolgt nur vorübergehend, im Sinne einer Tragehilfe. Eine längerfristige Anwendung ist nicht vorgesehen. Die Anwendung beschränkt sich auf die präklinische Versorgung und die erste Phase der klinischen Versorgung. Offene Wunden, Brüche und Verletzungen müssen vor Anwendung des Tragetuches nach den aktuellen Regeln der Fachgesellschaften versorgt werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt, welches nur von eingewiesenem und regelmäßig auf das Produkt geschultem medizinischen Fachpersonal angewendet werden darf. Die Art der Anwendung richtet sich nach den aktuellen, allgemein anerkannten medizinischen Richtlinien und Empfehlungen der entsprechenden Fachgesellschaften.

Anwendung:

INFO » Zur korrekten und schonenden Anwendung sind 2 - 4 Helfer notwendig.


1. Der liegende Patient wird auf eine Seite gedreht.
2. Falten Sie das PAX® Tragetuch der Länge nach doppelt und legen es parallel zum Patienten aus
3. Drehen Sie den Patienten auf die andere Seite
4. Entfalten Sie nun das PAX® Tragetuch und drehen den Patienten zurück auf den Rücken.
5. Die Anwender verteilen sich gleichmäßig an den langen Seiten des Tragetuches
6. Heben Sie nun unter Berücksichtigung des Schwerpunkts den Patienten gleichmäßig hoch.

Achten Sie unbedingt auf eine koordinierte Arbeitsweise um Missverständnisse zu vermeiden.

Führen Sie alle Schritte des Anwendungsprozesses schonend und mit Rücksicht auf das Verletzungs- oder Erkrankungsmuster des Patienten durch.



Bedienungsanleitung

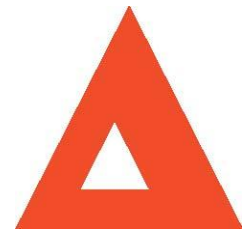

Artikelbezeichnung: **PAX® Tragetuch**
PAX® Tragetuch mit Fußsack
PAX® Tragetuch mit Durchrutschsicherung

Wiederverwendbarkeit:

Das Produkt kann bei erhaltener Funktion und unbeschädigtem Material wiederverwendet werden. Vor einer erneuten Anwendung muss sich der Anwender vom ordnungsgemäßen Zustand des Produktes überzeugt haben. Es dürfen nur Produkte in einwandfreiem technischen und hygienischen Zustand erneut angewendet werden.

Das Produkt hat einen Lebensdauer von max. 5 Jahren ab Kaufdatum. Es ist im jeden Einsatzjahr durch den verantwortlichen Medizinproduktebeauftragten eine Sichtprüfung aller Nähte, Verbindungen, Griffe und des Oberflächenmaterials durchzuführen und am Ende dieser Bedienungsanleitung zu dokumentieren. Schadhafte Produkte dürfen nicht mehr eingesetzt werden und sind zu entsorgen.

Reinigung und Pflege: Das PAX Tragetuch kann mit Wasser und einer Seifenlösung grob gereinigt werden. Eine extreme mechanische Reinigung, die zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen kann, ist zu vermeiden.

Reinigung und Pflege PAX®-Plan Die glatte Beschichtung dieser Materialien erlaubt eine Reinigung mit einem feuchten Baumwollwischtuch, um die leichteren Verschmutzungen zu entfernen. Je schneller die Verunreinigungen entfernt werden, desto länger kann man sich an einem makellosen Artikel erfreuen. Denn je länger der Schmutz auf dem Artikel verbleibt, desto stärker arbeitet der sich in das Material ein und lässt sich später nur noch mit einem Planenreiniger und Handwaschbürste entfernen. Bei der Wäsche wird das wasserdicht beschichtete Gewebe lediglich von der Waschlauge umspült. Dies ist anders als bei der Wäsche von Jeans oder Pullovers, da diese die Waschlauge durch das nicht beschichtete Gewebe passieren lassen und dabei die Schmutzpartikel mit ausgespült werden.

Eine Endbehandlung mit einem Imprägnierspray ist nicht notwendig. Bei der Maschinenwäsche sollte die Waschtemperatur optimalerweise max. 30°C betragen! Als Waschsubstanz empfehlen wir flüssiges Feinwaschmittel, da ein Trockenpulver Waschmittelreste auf dem Gewebe hinterlässt. Der Waschvorgang muss unbedingt ohne Schleudergang durchgeführt werden, da die wasserdichte Beschichtung ansonsten beschädigt wird. Wir bitten zu bedenken, dass jede Maschinenwäsche die Lebensdauer des Gewebes verkürzt!

Desinfektion:

Desinfektion ausschließlich mit alkoholbasierten (Ethanol / Propanol) Desinfektionsmitteln. Bei der Verwendung von anderen Substanzklassen kann es zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials kommen. Keine Lösungsmittel verwenden.

Jährliche Sichtprüfung

Produkt:		SN:		Kaufdatum:	
----------	--	-----	--	------------	--

	Datum	Beauftragter	Bestanden	Nicht bestanden	Maßnahmen
1. Jahr					
2. Jahr					
3. Jahr					
4. Jahr					
5. Jahr					

Das Produkt hat einen Lebensdauer von max. 5 Jahren ab Kaufdatum.

