

EW80[®] mat



Instrumenten-Reinigungs- und Desinfektionspräparat EW80[®] mat

Zur maschinellen chemothermischen Aufbereitung von persönlichen Schutzausrüstungen und Medizinprodukten.

- Anwenderfreundlich, schaumarm
- Aldehydfrei, phosphatfrei, phenolfrei
- Ideal zur chemothermischen Aufbereitung von persönlicher Schutzausrüstung



Produktbeschreibung:

EW80[®] mat ist ein Instrumenten-Reinigungs- und Desinfektionspräparat zur maschinellen und chemothermischen Aufbereitung von persönlichen Schutzausrüstungen z.B. Atem- und Chemieschutzausrüstungen und weiteren thermolabilen, nicht kritischen, nicht invasiven Medizinprodukten.

In Kombination mit einem neutralen Vorreiniger ist EW80[®] mat die optimale Lösung für eine schonende Reinigung und Desinfektion.

EW80[®] mat ist pH-neutral, schaumarm, frei von Säuren und enthält Korrosionsschutz. Daher werden Dichtungen und andere Materialien nicht angegriffen und einer Materialermüdung vorgebeugt. Zudem wird eine Eiweißfixierung wie bei Aldehyden vermieden.

Anwendungsgebiete:

EW80[®] mat ist besonders gut geeignet zur Verwendung in maschinellen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren für thermolabile nicht kritische, nicht invasive Medizinprodukte. Einsetzbar in allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsautomaten bei 55 - 60 °C.

Anwendung:

Instrumente und Medizinprodukte entsprechend der Empfehlung (zum Beispiel Hygieneplan) in die Maschine einlegen. Sämtliche zu desinfizierenden Flächen und Hohlräume müssen für die Maschinendesinfektion zugänglich sein.

1. Reinigungsspülgang mit geeignetem Reiniger
2. Desinfektionsspülgang mit EW80[®] mat

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweis

Bei Programmeinstellung beachten: Zudosierung erst ab 35 °C. Nicht zur Schlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten geeignet. Zur Schlussdesinfektion Medizinprodukte ab der Risikoklasse semikritisch A mit einem viruzid wirksamen Desinfektionsmittel, zum Beispiel mit PERFEKTAN ACTIVE oder DESCOTON EXTRA aufbereiten.



Dr. Schumacher



Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany

P +49 5664 9496-0 · www.schumacher-online.com

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten 5 min

Bakterien und Pilze

Anwendungsempfehlung zur Instrumentendesinfektion (bakterizid, levurozid)*	DGHM	55 °C, hohe Belastung	1 %
--	------	-----------------------	-----

Viren

begrenzt viruzid	RKI/DVV	55 °C	1 %
------------------	---------	-------	-----

Ergänzende Prüfergebnisse

tuberkulozid (M.terrae)	DGHM	55 °C, hohe Belastung	1 %
-------------------------	------	-----------------------	-----

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

Zusammensetzung:

EW80[®] mat enthält quaternäre Ammoniumverbindungen. 100 g enthalten: 2,1 g N-Decyl-N-isononyl-N,N-dimethylammoniumchlorid.

Materialverträglichkeit:

Die Anwendung von EW80[®] mat ist bei folgenden Materialien nicht zu empfehlen: Kupfer, Messing, Aluminium und Polycarbonat (PC).

Gutachten:

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gem. nationaler Richtlinien.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Gebinde **Inhalt** **VE** **Art. Nr.**

EW80[®] mat

Flachkanister	5 L	3	810205
Kanister	30 L	1	810230

Dosierhilfen & Zubehör

Kanisterdosierpumpe	2 L/5 L/10 L	1	00-906-000-01
Kanisterumfüllhahn	2 L/5 L/10 L	1	00-907-000
Kanisterschlüssel	-	1	00-909-050

CE 0482



Die Verfügbarkeit der Produkte sowie die Auslobung und Produkttexte können aufgrund nationaler Registrierungen variieren.